

Wie reinige ich meine Maske?



Nasal-Masken:

CARA **1**

JOYCEasy **2**

JOYCEone **3**

JOYCE

JOYCE SilkGel

Gebrauchsdauer bis zu 12 Monate*



Reinigungszyklus	täglich	wöchentlich
Komponenten	per Hand in warmem Wasser mit mildem Reinigungsmittel**	Spülmaschine bis 65 °C
Drehhülse	✓	✓
Kopfbänderung inkl. Clips	✓	-
Maskenkörper	✓	✓
Maskenkissen Silikon	✓	✓
Maskenkissen SilkGel	✓	✓
Sicherungsring	✓	✓
Stirnpolster Silikon	✓	✓
Stirnpolster SilkGel	✓	✓
Stirnstütze	✓	✓
Verschluss	✓	✓
Winkel	✓	✓

Nasenpolster-Maske:

NP 15 **4**

Gebrauchsdauer bis zu 12 Monate*





Reinigungszyklus	täglich	wöchentlich
Komponenten	per Hand in warmem Wasser mit mildem Reinigungsmittel**	Spülmaschine bis 65 °C
Drehhülse	✓	✓
Kopfbänderung inkl. Clips	✓	-
Maskenkörper	✓	✓
Maskenschlauch	✓	✓
Nasenpolster	✓	✓
Schlauchfixierclip	✓	✓
Schlauchfixierband	✓	-
Stirnpolster	✓	✓
Verschluss	✓	✓
Winkel	✓	✓

Full-Face-Masken:

CARA Full Face **5** JOYCEeasy Full Face JOYCEone Full Face **8** JOYCE Full Face SilkGel
 LENA **6** JOYCEeasy next Full Face **7** JOYCE Full Face JOYCE Full Face^{plus}

Gebrauchsdauer bis zu 12 Monate*

Reinigungszyklus	täglich	wöchentlich
Komponenten	per Hand in warmem Wasser mit mildem Reinigungsmittel**	Spülmaschine bis 65 °C
Drehhülse	✓	✓
Kopfbänderung inkl. Clips	✓	–
Maskenkörper	✓	✓
Maskenkissen Silikon	✓	✓
Maskenkissen SilkGel	✓	✓
Notfallausatemventil	✓	–
Reißleine	✓	–
Sicherungsring	✓	✓
Stirnpolster Silikon	✓	✓
Stirnpolster SilkGel	✓	✓
Stirnstütze	✓	✓
Verschluss	✓	✓
Winkel	✓	✓

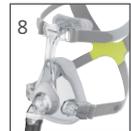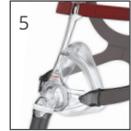

Zubehör:

Silentflow 2/3:
 Gebrauchsdauer 6 bis 12 Monate*

Schalldämpfer:
 Gebrauchsdauer bis zu 3 Monate*

Reinigungszyklus	wöchentlich	
Komponenten	per Hand in warmem Wasser mit mildem Reinigungsmittel**	Spülmaschine bis 65 °C
Silentflow 2/3		
Anschlusschülse	✓	✓
Mittelteil	✓	✓
Schalldämpfer		
Hülse	mit klarem Wasser	–
Poröser Filter		–
Verbindungsstück		–

Allgemeine Hinweise:

Diese Kurzanleitung ersetzt nicht die Gebrauchsanweisungen der einzelnen Produkte.

- * Materialien, die zur Herstellung von Masken verwendet werden, altern, wenn sie z. B. aggressiven Reinigungsmitteln ausgesetzt sind. Im Einzelfall kann es daher notwendig sein, dass Sie Ihre Maske früher ersetzen müssen.
- ** Wir empfehlen für die tägliche Reinigung einen Spezialreiniger, wie z.B. Löwosan.

CE 0197

© Urheberrechtlich geschützt. Nervielfältigung jeder Art nur mit ausdrücklicher Genehmigung durch Löwenstein Medical.
Alle Angaben aus drucktechnischen Gründen ohne Gewähr.



Löwenstein Medical Technology
Kronsaalweg 40
22525 Hamburg, Deutschland

Löwenstein Medical
Arzbacher Straße 80
56130 Bad Ems, Deutschland
T. +49 2603 9600-0
F. +49 2603 9600-50
info@loewensteinmedical.com



loewensteinmedical.com

 Menschen im Mittelpunkt